

10mL真空採血管を用いた遠心分離に！ かんたん操作のコンパクト遠心機

TOMY

卓上低速遠心機 LT-010M

用途

- 濃縮血小板フィブリン（ゲル・リキッド）の分離など

特長

- 見やすい、使いやすい 簡単タイマー

見やすい2色LED表示により、運転状況が一目でわかります。

プッシュでスタート、プッシュでストップができる使いやすいツマミ式のタイマーです。

- ブラシレスモーター

カーボンブラシ粉がでないブラシレスモーターを採用。

ブラシ粉によるコンタミネーションを防ぎます。

- 省スペース設計の卓上低速遠心機

253W×274Dmmのコンパクト設計。設置スペースが小さく場所を選びません。


- 規格適合

IEC 61010-1 / IEC 61010-2-020 / JIS C 61326-1



見やすい2色LED！

運転状況により、黄緑色／赤色に点灯

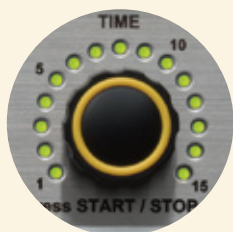

設定時

ツマミを回して遠心時間を設定。
設定時間を黄緑色で表示。
※写真の設定時間は15分です



スタート時

ツマミを押すと、運転中を示す赤色で表示。



運転中

経過時間が黄緑色に変わり、
残り時間を赤色で表示。
※写真の残り時間は7分です



停止後

設定時に戻り、黄緑色で表示。

本体仕様

型式名称	LT-010M
定常回転数	2,900rpm
遠心加速度	890G
最大容量	10mL 真空採血管（公称寸法:Φ16×100mm）×4本
タイマー	15分（1分刻み）
外形寸法／質量	253W×274D×243H mm（突起部は含まず）／7kg
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
安全装置	ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
医療機器製造販売業許可番号	07B2X00007
価格	220,000円（税別）

販売元

株式会社 トミー精工

<https://bio.tomys.co.jp>

本社 東京都練馬区田柄 3-14-17 事業所 札幌 011-728-1311・仙台 022-390-5375・つくば 029-830-5166・神奈川 046-220-5371
03-5987-3111 名古屋 0561-61-0250・大阪 06-6305-3333・福岡 092-948-1712

■価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。 ■表示されている価格に、消費税は含まれておりません。